



Original Aktiv-Spreizhose mit Beuge-Vorhaltekeilen


nach Prof. Dr. H. Mittelmeier

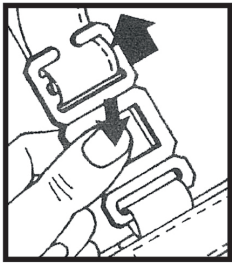

Öffen

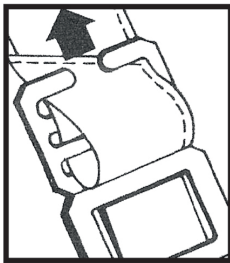

Korrektes Einfädeln

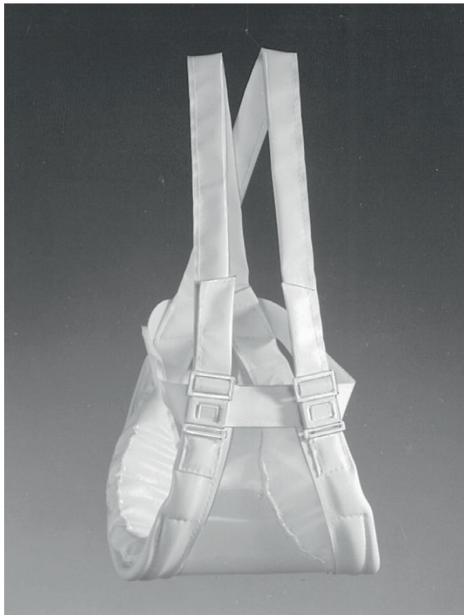


Zur gefahrlosen funktionellen
Behandlung der angeborenen
Hüftluxation und -luxation.

Vor dem Anlegen der Spreizschale
bitten wir folgende Hinweise zu beachten:

Die Luxationshose wird zuerst
ausgebreitet und dabei die Träger
kreuzweise übereinandergelegt.
Dann wird das Kind auf die Hose gelegt
und die Steckverschlüsse geschlossen
(siehe Zeichnungen). Zum Schluß
werden die seitlichen Klettverschlüsse
übereinandergelegt.

Die Beuge-Vorhaltekeile sind mit
Klettverschluß befestigt und bieten
dadurch die Möglichkeit einer gewissen
Stellungsvariation im Sinne stärkerer
Beugung und Vorhalte.

Bitte vermeiden Sie, dass das Kind
ohne Anweisung Ihres Arztes aus der
Luxationshose genommen wird mit
Ausnahme während der Körperpflege.

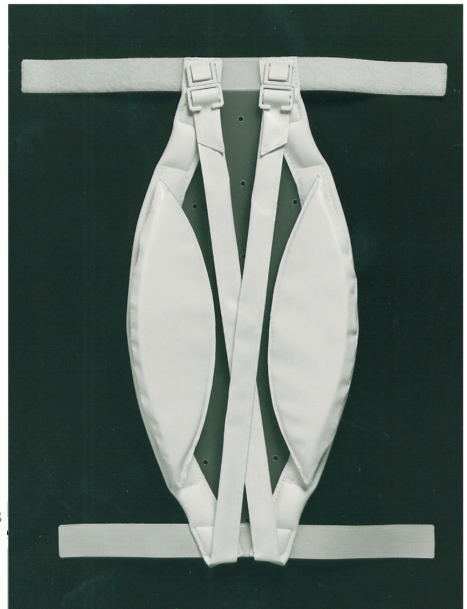

AIDAMED e. K.

Fröbelstr. 10 - D-90489 Nürnberg

Tel.: + 49 911 92 867 11 Fax: + 49 911 92 867 13

www.aida-med.de info@aida-med.de

