

„BabyFLEX“

Pavlik-Bandage

Karabinerhaken & D-Ringe

AIDAMED

Diagnostik - Therapie - Hygiene



Indikation:

- Hüftluxation
- Hüftdysplasie

Modell
Karabiner



Artikel Nr.:	Größe	Brustumfang
800-X0-Karabiner	X0	30-35 cm
800-00-Karabiner	0	35-40 cm
800-01-Karabiner	1	40-45 cm
800-02-Karabiner	2	45-55 cm

Modell
Soft + Füße



Artikel Nr.:	Größe	Brustumfang
800-X0-Soft	X0	30-35 cm
800-00-Soft	0	35-40 cm
800-01-Soft	1	40-45 cm
800-02-Soft	2	45-55 cm

Kontraindikation:

- nicht direkt auf verletzter, irritierter oder geschädigter Haut tragen



AIDAMED e. K.
Fröbelstr. 10 - D-90489 Nürnberg
info@aida-med.de



Tel.: + 49 911 92 867 11
Fax: + 49 911 92 867 13
www.aida-med.de

„BabyFLEX“

Pavlik-Bandage mit variabler Abduktion


AIDAMED

Diagnostik - Therapie - Hygiene



Anwendung:

- Vor dem ersten Anlegen werden alle Schließen und Haken von Brust-, (1) Schulter-(2), vordere- (3) und hintere Beingurten (4) geöffnet.
- Das Kind auf dem Rücken auf der BabyFLEX - Pavlik Bandage legen, so dass der Brustgurt (1) einen Fingerbreit unterhalb der Achsel und noch oberhalb der Brust geschlossen werden kann.
- Die Schultergurte (2) im Rücken überkreuzen, an der **Schließen** auf der Vorderseite befestigen, und die Längen anpassen.
- Die Beingurte(3) werden so angelegt, dass die Längsbänder parallel zur beiden Seiten der Unterschenkel über dem inneren, und äußeren Knöchel verlaufen.
- Das um den Fußunterseite herum verlaufende Gurtteil, muss einige Zentimeter vor der Fersenhinterkante, Richtung Fußmitte hin, positioniert sein.
- Die vorderen Beingurte (3), an der Innenseite verlaufend, werden so **an dem D-Ring** befestigt, dass ein Abspreizwinkel (Abduktion) der Oberschenkel in den Hüftgelenken von 50°-55° je Beinseite entsteht.
- Die Befestigung der Beingurte muss vor der Achsellinie liegen.
- Nachfolgend werden die hinteren Beingurte (4), nach außen verlaufend, an der rückenseiteigen **D-Ring** des Brustgurtes befestigt und angepasst.
- Die vorne-(3) und hinten-(4) verlaufenden Beingurte werden durch die zwei Verschlüsse (5) oberhalb der Ferse und um den Unterschenkel fixiert. Um eine korrekten Sitz zu gewährleisten, müssen diese Verschlüsse nicht zu locker angelegt werden.

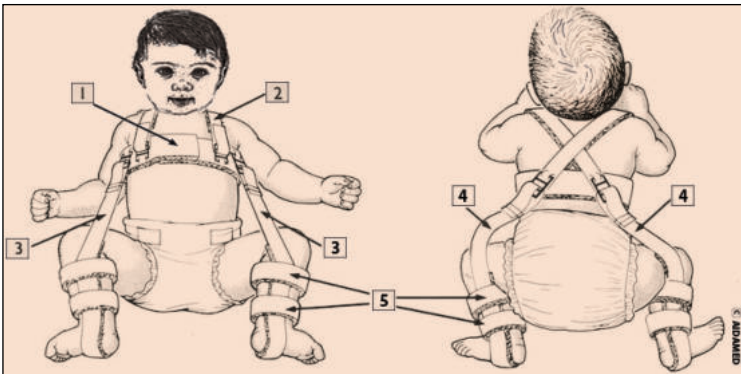

BabyFLEX - Pavlik-Bandage erfordert eine qualifizierte, individuelle und indikationsgerechte Anpassung an den Säugling durch entsprechendes ausgebildetes Fachpersonal.

Material

- Gurte: PP Gurtband,
- Polster: PU- Schaum mit Charmeuse
- Klettverschlüsse: Velcro
- Schließen: Kunststoff, Metall

Wichtig!

KEIN WIEDEREINSATZ - dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Säuglings bestimmt!

Pflegeeigenschaften:

- **BabyFLEX**-Pavlik-Bandage lässt sich bei 30°C Feinwäsche waschen.



AIDAMED e. K.
Fröbelstr. 10 - D-90489 Nürnberg
info@aida-med.de



Tel.: + 49 911 92 867 11
Fax: + 49 911 92 867 13
www.aida-med.de