

RELEXTA Typ 2

Orthopädische-Beuge-Spreizwindel

Indikation:

Hüftreifungsverzögerung Typ IIa nach Graf

"RELEXTA" Typ 2 ist eine weiterentwickelte, orthopädische Abspreizwindel mit **permanenter Beinbeugung** und **optimaler Abspreizung** welche die Ausreifung der Hüftgelenke beim Neugeborenen / Säugling unterstützt.

Relexta ersetzt gleichzeitig das breite Wickeln, und wird vom Hebammen und Kinderärzten generell empfohlen.

Größe	Abspreizung	Alter	PZN	Art.Nr.:
X0	10 cm	Für Frühgeborene	17281500	600-10-T2
0	12 cm	0 - 4 Wochen	17281339	600-12-T2
I	14 cm	4 - 8 Wochen	17281397	600-14-T2
II	16 cm	8 - 12 Wochen	17281411	600-16-T2



Die Abspreizwindel / Breitwickelbandage sollte etwa so breit wie die Kniekehlen sein, wenn sich die Beine des Kindes in der Froschstellung (natürliche Stellung) befinden. Es wird empfohlen mit einem Lineal den Abstand zwischen den Innenseiten der Kniekehlen zu messen, wenn sich das Kind auf dem Rücken in seiner natürlichen Position befindet.



RELEXTA Typ 2

Orthopädische-Beuge-Spreizwindel

AIDAMED

Diagnostik - Therapie - Hygiene



Liebe Eltern,

bei Ihrem Kind ist eine sogenannte „physiologische“ Hüftreifungsverzögerung (Typ IIa) im Rahmen der Ultraschalluntersuchung der Hüftgelenke festgestellt worden. Bei ungefähr 30 % aller Neugeborenen fällt diese Hüftreifungsstörung beim Ultraschall auf.

Was aber bedeutet genau „physiologische“ Hüftreifungsverzögerung?

Es handelt sich hierbei lediglich um eine leichte Reifungsstörung der Hüftpfanne, welche den kindlichen knorpeligen Hüftkopf normalerweise knöchern gut übergreift.

Dies ist nicht besorgniserregend und durch den frühen Beginn einer entsprechenden Therapie in nahezu allen Fällen schnell zu beheben. Zur Unterstützung der Ausreifung ist es notwendig, die im mütterlichen Bauch innegehabte Beugestellung der Hüftgelenke durch eine vermehrte Abspreizung der Beinchen wieder herbeizuführen. Dadurch wird der Druck auf die Hüftpfanne vermindert und das Hüftgelenk kann gut ausreifen. Durch den Einsatz der Abspreizwindel „Relexta“ geschieht dieses innerhalb der folgenden Lebenswochen. Diese soll für 24 Stunden am Tag konsequent getragen werden.

Korrektes Anlegen der Relexta-Beuge-Abspreizwindel:

Die Babyhaut ist zart und empfindlich, deshalb wird empfohlen die Abspreizwindel über den Strampler zu tragen. Die angebrachten Klettverschlüsse sorgen für ein einfaches und sicheres Anlegen. Bitte schließen Sie **zuerst die unteren schrägverlaufenden Klettverschlüsse** zu, dann passen Sie oberen Verschlüsse am Bauch an.

Sollte der Klett über den Flausch an den Beinen, oder am Bauch über das Etikett stehen, so kann dieser 1-2 cm gekürzt werden, um Schäden an der Spreizhose zu vermeiden. Bitte öffnen Sie die Klettverschlüsse nicht ruckartig, um ein Erschrecken des Säuglings zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis:

KEIN WIEDEREINSATZ - Dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt.

„Relexta“
zeichnet
sich aus durch

- korrekte Beinstellung
- flexibel und leichte Handhabung
- ausreichende Starrheit für die Spreizstellung
- sehr bequem für Mutter und Kind
- hergestellt in Deutschland
- erprobtes Produkt
- rezeptierbar

„Produkt-
zusammen-
stellung

- Abspreizwindel:
 - 100 % Polypropylene
 - waschbar in 40°
- Abspreizteil:
 - 100 % PE-Platte
 - Wasserabweisend



AIDAMED e. K.

Fröbelstr. 10 - D-90489 Nürnberg

info@aida-med.de



Tel.: + 49 911 92 867 11

Fax: + 49 911 92 867 13

www.aida-med.de